

Info für die behandelnde Ärztin/ den behandelnden Arzt

Kennzeichnung der Frakturstelle als Behandlungsstelle für Melmak Ultraschall

- Bestimmung der Frakturstelle/Behandlungsstelle durch Markierung (mit Stift auf der Haut) unter C-Bogen oder ausmessen auf digitalen Röntgenbildern.
- Liegendes Metall wie Schrauben, Nägel, Marknägel sind keine Kontra-Indikation.
- Metallplatten reflektieren den Ultraschall, hier muss von seitlich oder gegenüber behandelt werden.
- Keine Erwärmung, da gepulster Ultraschall, damit auch für infizierte Frakturen geeignet.
- Mehrere Behandlungsstellen sind möglich, Therapiegerät ist nicht limitiert.
- Beschallung nur im Schallkopfbereich, keine seitliche Streuung. Eindringtiefe etwa 20-25 cm.
- 20 Minuten tägliche Behandlung je Behandlungsstelle über dem Frakturspalt ohne Bewegung des Schallkopfes.



Für Rückfragen stehen Ihnen die Melmak Medizinprodukteberater im Innendienst gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Mit freundlichen Grüßen

Melmak GmbH
Ultraschall zur Frakturheilung

Ursula Fischer

ppa. Ursula Fischer

Kontraindikationen oder nur nach Einschätzung durch den Arzt:

- Schwangerschaft
- Krebs
- Frakturen Schädel oder Wirbelsäule
- Kinder/ Heranwachsende (nahe Epiphysenfuge)
- Herzschrittmacher

